



ニッパー / ソンデ / 爪切り 器具の洗浄アイテム

フットケア用品は、専用の洗浄アイテムを使って、
確実、丁寧に洗浄・消毒・除菌をしましょう。
衛生を保つことはもちろん器具を長持ちさせることにも繋がります。



これだけは
そろえて
おきたい!

器具用洗浄ブラシ

しっかり汚れを落としつつ
ニッパー類等金属の表面を
傷つけません



モヒカン

FOT-38-0002
全長(毛先含まず) = 215mm
毛先の長さ = 15mm
材質 = ナイロン

フット器具用洗浄ブラシ

全長 = 100mm
毛先の長さ = 18mm 材質 = ソフトポリエステル

FOT-38-0100

除菌ができる洗浄剤 (中性)

浸漬もブラシ洗浄もおまかせ
二刀流の洗浄剤

洗いさん

床や設備にも
使用できます

1kg入 **希釈使用**

スラシ洗浄の場合
= 20倍希釈
浸漬の場合
= 100~600倍
(30分程度)



FOT-45-0020



FOT-45-0021

希釈用ポンプ

超音波洗浄機 (日本製)

WT-C401

FOT-39-0003



サロンや施設に1台は欲しい!
ニッパーの接合部分や
アタッチメントなどブラシ
の届きにくい細かい所まで
洗浄できます。

発振周波数: 40kHz
タンク容量: 1.3ℓ
タイマー: 5分 / 10分
サイズ:
W243×D196×W184mm
重量: 2.3kg

消毒液 (エタノール系)

ツールクリーン ユーカリ

FOT-42-0002

器具に優しい消毒液です。短時間で
殺菌効果を発揮します。



皮ふ保護クリーム (医薬部外品)

ケロデックス クリーム

こまめな手洗いや消毒
液による手荒れ・肌荒
れを防ぎます。店頭販
売もしていただけます。



ニッパー・はさみのメンテナンス剤

可動部の摩擦を軽減し
器具を長持ちさせます

医療用に開発された特殊潤滑油
です。除菌、滅菌を妨げません。
シリコン・フロンガス不使用。
ニッパーのジョイント部分に塗
布しやすいスプレータイプです。

オイルスプレー器具用 **JG600**
300mL FOT-12-0111



*製品の名称・仕様等は予告なく変更する場合がございます。



ニッパー ソンデ 爪切り

フットケア用具の洗浄・消毒方法

STEP 1

洗浄 | ブラシ or 超音波洗浄機を使って器具を洗浄する

〈ブラシの場合〉

洗いさん(除菌剤入り中性洗浄剤)をナイロンブラシ等につけ、角質や汚れが取れるまで、しっかりこすり落とします。



〈超音波洗浄機の場合〉

超音波洗浄機に洗いさん(除菌剤入り中性洗浄剤)を入れ、5～10分超音波洗浄を行います。

STEP 2

乾燥 | 十分に乾燥させる

濡れた状態で放置すると菌の繁殖や器具のサビなどの原因となります。
完全に乾燥させましょう。

STEP 3

消毒 | 器具を消毒する

ツールクリーン(アルコール系消毒液)を使い、器具を清潔な状態に保ちます。

その他のポイント

●器具はこまめに点検しましょう

器具の小さな傷は大きな破損に繋がることもあります。普段からこまめに点検することで、器具を正しく使用でき、いつも通りのケアを行うことができます。

●メンテナンスオイルを使いましょう

ニッパーなどは、可動部分にも気を配ることが大切です。洗浄後は可動部にメンテナンスオイルを塗布しましょう。摩擦が軽減され、器具を長持ちさせます。

スプレータイプで
使いやすい!

医療用に開発された
器具用メンテナンスオイルです
シリコンフリー
フロンガス不使用

オイルスプレー器具用 JG600
300mL FOT-12-0111

*製品の名称・仕様等は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 佐 鳴

〒245-0053 横浜市戸塚区上矢部町 2091-19
TEL 045-811-9311(代) FAX 045-811-9319

さなる フットケア Search

www.sanaru.co.jp/fc/



YouTube

【プロ専用】

さなるのフットケアチャンネル