



sanaru.co.jp/fc
Foot care items
for Professional use

ニッパー / ソンデ / 爪切り 器具の洗浄アイテム

これだけは
そろえて
おきたい!



不特定多数の利用者さんのために、フットケア用品は
専用の洗浄アイテムを使って確実、丁寧に除菌・洗浄しましょう。
衛生を保つことはもちろん器具を長持ちさせることにも繋がります。

洗浄用ナイロンブラシ

ニッパー類等金属の表面を傷つけない
ナイロン製のブラシです。

モヒカン

NJ-81

FOT-38-0002
全長(毛先含まず) = 215mm
毛先の長さ = 15mm
材質 = ナイロン



サニフィットブラシ

FOT-38-0004
全長 = 102mm 材質 = ポリエステル
毛先の長さ = 20mm

除菌ができる洗浄剤〈中性〉

洗い洗

1kg入 **希釈使用**

ブラシ洗浄の場合
= 20倍希釈
浸漬の場合
= 100~600倍
(30分程度)

別売/
詰め替えポンプ
(目盛り付き)



FOT-45-0020

FOT-45-0021

超音波洗浄機

WT-C401

FOT-39-0003

スイッチ1つの簡単操作!
均一的な洗浄が可能です。

発振周波数: 40kHz
タンク容量: 1.3ℓ
タイマー: 5分 / 10分
サイズ:
W243×D196×H184mm
重量: 2.3kg



消毒液〈エタノール系〉

ツールクリーン ユーカリ

FOT-42-0002

器具に優しいフットケア専用の消毒液
です。



環境除菌剤

弱アルカリ性 / 設備、床などに

プロベスト

FOT-45-0030

施設内の床やテーブル、ドアノブなどの
接触面に使用してください。
50~100倍に希釈して使用、洗浄後
は、水ですすぐか十分に水拭きしてく
ださい。



ニッパーメンテナンス剤

メンテナンス用オイル JG598

50mL FOT-12-0112

オイルスプレー器具用 JG600

300mL FOT-12-0111

器具の滅菌効果を妨げない特殊成
分で作られた潤滑油です。
シリコン・フロンガスは不使用。
可動部の摩擦を軽減させます。





sanaru.co.jp/fc
Foot care items
for Professional use

ニッパー / ソンデ / 爪切り

フットケア用具の洗浄・消毒方法

STEP 1

洗浄 | ブラシ or 超音波洗浄機を使って器具を洗浄する

〈ブラシの場合〉

洗いさん(除菌剤入り中性洗浄剤)をナイロンブラシ等につけ、角質や汚れが取れるまで、しっかりこすり落とします。

〈超音波洗浄機の場合〉

超音波洗浄機に洗いさん(除菌剤入り中性洗浄剤)を入れ、5~10分超音波洗浄を行います。



STEP 2

乾燥 | 十分に乾燥させる

濡れた状態で放置すると菌の繁殖や器具のサビなどの原因となります。
完全に乾燥させましょう。

STEP 3

消毒 | 器具を消毒する

ツールクリーン(アルコール系消毒液)を使い、器具を清潔な状態に保ちます。



その他のポイント

●器具はこまめに点検しましょう

器具の小さな傷は大きな破損に繋がることもあります。普段からこまめに点検することで、器具を正しく使用でき、いつも通りのケアを行うことができます。

●メンテナンスオイルを使いましょう

ニッパーなどは、可動部分にも気を配ることが大切です。洗浄後は可動部にメンテナンスオイルを塗布しましょう。摩擦が軽減され、器具を長持ちさせます。



メンテナンス用オイル JG598 50mL FOT-12-0112
オイルスプレー器具用 JG600 300mL FOT-12-0111

*製品の名称・仕様等は予告なく変更する場合がございます。

Manufacturer,
Importer & Exporter

株式会社 佐 鳴

〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 2091-19
TEL. 045-811-9311(代) FAX.045-811-9319

さなる フットケア

Search