


Version up!

強度アップで  
さらに  
使いやすく!

# コレクティオ パーフェクト

爪の溝にワイヤーを引っかけて  
ねじり上げ  
巻き爪・陥入爪を広げることでより  
浮かせる画期的なケア法

メリット

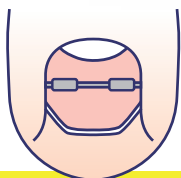

※コレクティオパーフェクト  
(レギュラー)実物大

1 短い爪や両角を切り落としている爪、  
肥厚爪や肉芽のある爪でも矯正が可能

2 3~5分で  
スピーディーに矯正完了

3 装着期間は1~3か月  
生体適合性に優れたエルジロイ製

4 爪の状態に合わせて  
矯正が可能

5 導入医療機関 約2,000件  
(2023年実績)

施術例 あらゆる巻き爪・陥入爪のケアが可能!



Before



After



Before



After



## コレクティオパーフェクト 爪の状態に合わせてお選びいただけます。


レギュラー	一般的な爪	
ハード	硬い爪	
ワイド	肥厚爪・幅広の爪・重度の巻き爪	
ミニ	第2趾など幅の狭い爪	



▲完成実例

※1趾に対して2本使用します。左右の区別はありません。  
 ※1つの爪に対してレギュラーとミニ、ハードとワイドを組み合わせることもできます。

### エルジロイのダブル矯正力

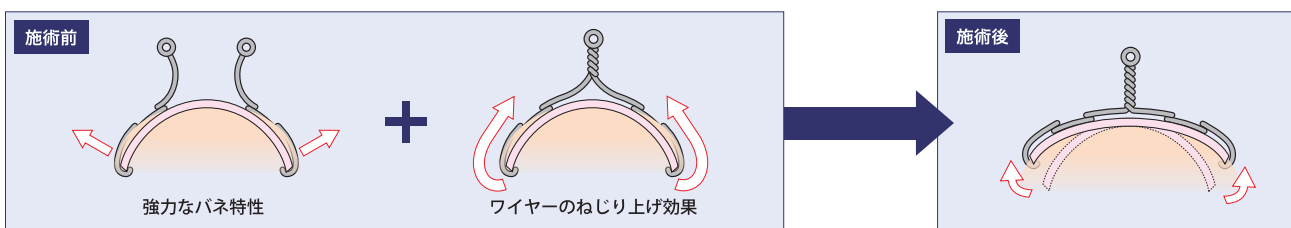

### 施術手順

…解説マニュアルですぐに施術可能です。

- フック先端部  
持針器で挟む。※皮膚へのダメージをおさえるために、フック先端部を丸く加工しています。
- 爪溝にワイヤーを下方から挿入。
- ワイヤーを90度回転させて爪の端に引っ掛ける。
- 反対側も同様に挿入する。
- 片方の手でワイヤーを押さえながら、2個のリングにウインチの先を引っ掛け、上方向に引き上げながらねじり上げる。
- 軟線を前後に揺らして、爪と一体化しているかを確認する。爪表面でワイヤーが動くようであれば再度ねじり上げる。
- 余分な軟線ワイヤーを切断する。
- ブルーライトジェルでコレクティオパーフェクト全体を覆い、ブルーライトを照射して硬化、コーティングする。(約60秒)

## コレクティオパーフェクトを施術するには 巻き爪スターターセットが必要です



R-3053

### コレクティオパーフェクト 巻き爪スターターセット

セット内容

- ①ブルーライト ②ブルーライトジェル ③ホワイトブロック ④クリーナー
- ⑤フックブレイヤー ⑥マイクロカッター ⑦持針器 ⑧ウインチ ⑨ゾンデノーマル
- ⑩筆 ⑪収納ケース ※施術には、別途コレクティオパーフェクトが必要です。

## Corectio® Perfect

巻き爪矯正 コレクティオパーフェクト

- R-3400 コレクティオパーフェクト レギュラー (20本入)
- R-3402 コレクティオパーフェクト ハード (20本入)
- R-3404 コレクティオパーフェクト ワイド (20本入)
- R-3406 コレクティオパーフェクト ミニ (20本入)
- R-3408 コレクティオパーフェクト セット (20本入)  
(レギュラー8本、ハード4本、ワイド4本、ミニ4本の計20本入)

